



Übergabeprotokoll und Garantiedokument

Montagedatum: _____

Vorgangsnummer: _____

Name und Anschrift des Betreibers

Zum Lieferumfang gehörende Produkte:

Type

Serien-Nr.

- Behandlungseinheit
- Behandlungsstuhl
- Arbeitsstuhl (Arzt)
- Arbeitsstuhl (Helferin)
- Bildschirm
- Kamera

Das an Belmont-Takara eingesandte Übergabeprotokoll ist die Grundlage zur Erfüllung etwaiger Garantieansprüche. Die Montage und Erstellung des Übergabeprotokolls hat taggleich zu erfolgen mit Ausnahme der Einweisung.

Das Gerät befindet sich äußerlich in einem einwandfreien Zustand? ja nein
 Alle auf dem Lieferschein/Rechnung aufgeführten Komponenten sind vorhanden ja nein

Systemluftdruck (0,55 MPa) _____ Wassersystemdruck (0,2 MPa) _____ Netzspannung (230 V) _____
 Wasserhärte (8-12° dH) _____

Funktion in Ordnung bzw. richtig eingestellt:

- Federarmspannung: Arztelement ja nein
- Leuchtentragarm ja nein
- Elektrische Funktionen ja nein
- Medien Funktionen ja nein
- Luft- und Wassermengen gemäß Montageanweisung
- Absaugung ja nein
- Mundglasfüllung (Menge/warm) ja nein
- Speischalenwasser (Menge) ja nein
- Stuhlprogramme ja nein
- Bausätze im Zuge der Montage eingebaut? ja nein

Wenn ja, welche?

.....

.....

- Amalgamabscheider funktioniert? ja nein
- Separierautomatik funktioniert? ja nein
- Schalensperrventil funktioniert? ja nein
- Schutzleiter angeschlossen? ja nein
- Sicherheitsabschaltungen i. O. ? ja nein

Länderspezifisch notwendig bzw. fakultativ:

- Medizinproduktebuch übergeben? ja nein
- Betriebsbuch zum Amalgamabscheider übergeben? ja nein
- Gerät über FI-Schutzschalter abgesichert? ja nein

Bemerkungen / Mängel:

.....

Techniker:

Das Gerät wurde gemäß Montageanweisung montiert. Die sicherheitstechnischen Kontrollen wurden, soweit länderspezifisch erforderlich, durchgeführt und dokumentiert.

Der Techniker bestätigt die für die Montage erforderliche Sachkenntnis zu haben ja nein

Es wurden Mängel festgestellt ja nein

Die Mängel wurden beseitigt ja nein

Tel.-Nr. des Service-Technikers für evtl. Rückfragen:

.....

Betreiber / autorisierte Person:

Ihnen wurde die zum Gerät gehörenden Gebrauchs- und Montageanleitungen übergeben. Sie wurden in Anwendung und sachgerechter Handhabung/Pflege des Produkts unterwiesen. Der Unterzeichnende bestätigt, dass das aufgestellte Gerät in ordnungsgemäßem Zustand übergeben wurde.

.....

1. Blatt weiß für Belmont Takara
 2. Blatt grün für Betreiber
 3. Blatt gelb für Depot